

EKOVEL ZGLOBNA LONGETA ZA ČUKLJEVE (HALLUX VALGUS)

Uputstvo za upotrebu

- Koristi u preventivi i terapiji deformiteta stopala, takozvanih čukljeva (*hallux valgus*);
- Sprečava bolove u čukljevima, njihov rast i krivljenje palčeva;
- Pomaže ispravljanje iščašenog zgloba nožnog palca;
- Postepeno vraća palac u pravilan, prirodni položaj;



Ekovel zglobna longeta za čukljeve je ortopedsko pomagalo koje se **koristi u preventivi i terapiji** deformiteta Hallux Valgus (čukljevi). Njenim korišćenjem postiže se ispravljanje iščašenog zgloba i postepeno vraćanje palca u pravilan, prirodan položaj. Srpečava bolove u čukljevima, njihov rast i krivljenje palčeva.

EKOVEL ZGLOBNA LONGETA ZA ČUKLJEVE postavlja se na stopalo sa unutrašnje strane (uz nožni palac) i fiksira se pomoću njenih kaiševa, zatezanjem oko vrha palca i središnjeg dela stopala, kao na slikama:



Zatezanjem kaiša oko vrha palca postiže se imobilizacija palca i vraćanje zgloba u anatomski ispravan položaj. Ekovel zglobna longeta koristi se u toku noći i boravka u kući - zglob na longeti omogućava nesmetano hodanje u kućnim uslovima.